




Zasady przesyłania **materiałów klinicznych** do KOROUN



Materiał pobrany przyżyciowo


- 

1 Pobrany od pacjenta jak najszybciej: najlepiej przed podaniem pierwszej dawki antybiotyku, nie później niż 72 h od włączenia antybiotykoterapii

 **płyn mózgowo-rdzeniowy**
(nie mniej niż 200 µl)


 **krew pełna 1,5 - 2 ml** (noworodki 0,5-1 ml)
pobrana na antykoagulant
(np. EDTA, heparyna, cytrynian)


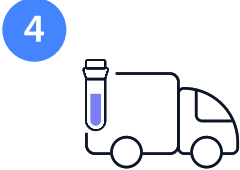
 **surowica**
(1,5 ml)
- 

2 Opisać próbki imieniem i nazwiskiem pacjenta (inicjałami), rodzajem materiału oraz datą i godziną pobrania materiału.
- 


3 Przechowywanie do momentu wysłania


1. dzień 7. dzień > 7. dzień

 **<7 dni**
w temperaturze lodówki

 **>7 dni**
zamrozić w -20°C, **najlepiej w -70°C**
i wysłać zamrożone na suchym lodzie lub wkładem chłodzącym.
- 

4 Przesłać kurierem w dokładnie opisanych, jałowych i szczelnie zamkniętych pojemnikach/probówkach (odpowiednia wielkość pojemnika do objętości próbki)

 próbki **niezamrożone**
w temperaturze pokojowej

 próbki **zamrożone** na suchym lodzie lub z wkładem chłodzącym

! UWAGA !

Przesyłka musi zawierać poprawnie wypełniony formularz zlecenia badania referencyjnego dostępny do pobrania na stronie ośrodka KOROUN. W przypadku braku wypełnienia formularza lub nieprawidłowo przesłanego materiału KOROUN może odmówić wykonania badania.